

Kurzanleitung Antigen-Selbsttest


Produkt: CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test
Hersteller: Siemens Healthineers



Vorbereitung

1

Verschlussfolie vom Röhrchen entfernen und Röhrchen in eine Halterung stellen (z. B. Klammer)

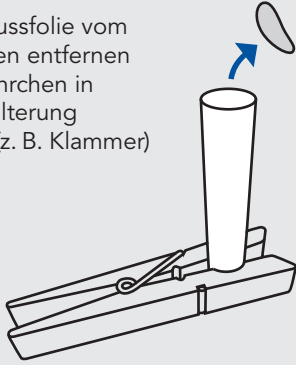


Probennahme (bei Zimmertemperatur)

2

Abstrichtupfer nacheinander in beide Nasenlöcher ca. 2-4 cm einführen, jeweils fünfmal gegen die Naseninnenseite drehen

Den Tupfer nicht tiefer einführen, wenn Widerstand spürbar ist

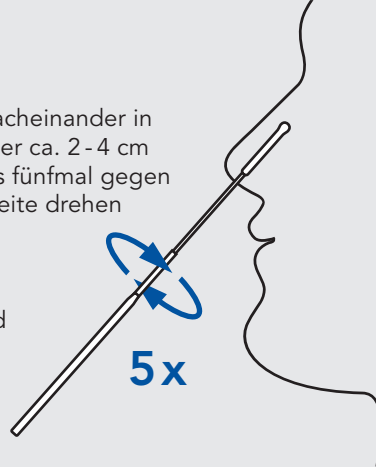


Probenbehandlung

3

mind. 6x

Abstrichtupfer in das Röhrchen einführen, mindestens sechsmal drehen und dabei gegen die Röhrchenwand drücken

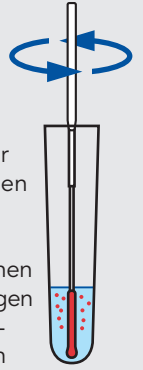

Probenbehandlung


4



Abstrichtupfer eine Minute im Röhrchen stehenlassen

5

Röhrchen mehrmals gegen Tupfer zusammendrücken

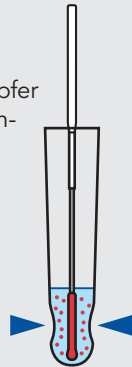

6


Abstrichtupfer entnehmen und dabei Röhrchen zusammendrücken, um Flüssigkeit vom Tupfer abzustreifen

Anschließend Tropfkappe fest aufsetzen



7

Vier Tropfen in Probenvertiefung auf der Testkassette geben

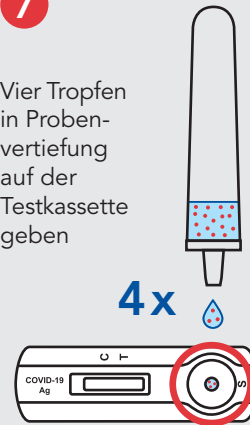

8




Ergebnis ablesen **nach 15 min**

Sind mehr als 20 Minuten vergangen, ist der Test ungültig und muss wiederholt werden

Auswertung Testergebnis

Jede Farbschattierung bei der Testlinie (T) ist als positiv zu betrachten

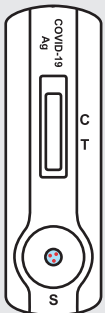


Negativ

Farbige Kontrolllinie (C)



keine Infektion nachweisbar

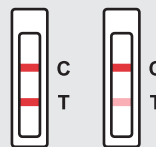


Positiv

Farbige Kontroll- (C) und Testlinie (T)



Verdacht auf Infektion: PCR-Test erforderlich

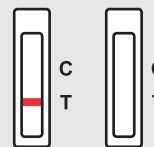

Ungültig / unklar

Keine Kontrolllinie (C)



Test wiederholen

Entsorgung



Verwendete Testkits in einem verschlossenen Beutel im Hausmüll entsorgen